



DESIFOR-QUICK

Flüssiges Schnelldesinfektionsmittel, Rückstandsfrei, Parfümfrei

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

DESIFOR-QUICK immer unverdünnt anwenden! Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig mit DESIFOR-QUICK benetzen und abrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Technische Informationen

Karton mit 49 Pumpsprayfl. à 50 ml Art.-Nr. 00522
 Karton mit 6 Fl. à 500 ml,
 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 00521
 Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20451

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol, 2,9 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

Baua Reg.-Nr. N-58211, N-58212

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid:		
VAH-Liste, mit Mechanik, hohe Belastung	konz. 5 Min.	gem. VAH/DGHM, lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung	konz. 5 Min.	gem. VAH/DGHM, EN 13697
EN 13727, EN 13624, EN 16615	konz. 5 Min.	20 °C, hohe und niedrige Belastung, getränkte Tücher (Standardtuch) können bis zu 28 Tage verwendet werden
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid:		
EN 1276, EN 1650, EN 13697	konz. 1 Min.	10 °C, hohe und niedrige Belastung
EN 1276, EN 1650, EN 13697	konz. 1 Min.	20 °C, hohe und niedrige Belastung
EN 1276, EN 1650, EN 16615	konz. 1 Min.	20 °C, hohe und niedrige Belastung, getränkte Tücher (Standardtuch) können bis zu 28 Tage verwendet werden
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14348 hohe u. niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
Rotaviren	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476 niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet, aufgeführt in IHO-Desinfektionsmittel- und IHO-Viruzidie-Liste
- Parfümfrei
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Für Humanmedizinischen Bereich
- Für Bereiche Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen
- HACCP-Bescheinigung
- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas/Plexiglas). Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie des Explosionsschutzes nicht mehr als 50 ml je m² Raumgrundfläche betragen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0617

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE